



100% MEDICAL GRADE SILICONE

درمان تخصصی اسکارهای جدید و قدیمی

✓ شیت سیلیکونی

✓ ژل سیلیکونی

دارای نشان CE اتحادیه اروپا

تحت لیسانس کمپانی اسکافارما - آلمان

Under License of Eska Pharma GmbH **Germany**



سیلیکون تراپی محبوب ترین و موثرترین روش غیر تهاجمی درمان انواع اسکار است و بطور پیوسته توسط پزشکان سراسر دنیا تجویز می گردد. اثربخشی سیلیکون در مطالعات بالینی متعددی توسط مراکز معتبر بین المللی به اثبات رسیده است.

برند دی جی حاوی ۱۰۰٪ سیلیکون طبی خالص است، که دارای ژل سیلیکونی و شیت سیلیکونی می باشد. این محصولات دارای تاییدیه CE اروپا می باشند و در درمان انواع اسکار موثر هستند، از جمله:

Keloid Scars (آثار زخم های کلوئیدی)

Surgical Scars (آثار زخم های جراحی)

Hypertrophic Scars (آثار زخم های برجسته)

Traumatic Scars (آثار زخم هایی که بر اثر ضربه ایجاد شده اند)

Burn Scars (آثار زخم های سوختگی)

Acne Scars (آثار به جای مانده از جوش های پوستی)

Stretch Marks (خطوط حاملگی و چاقی)

SCAR GEL



ژل سیلیکونی اسکارژل حاوی ۱۰۰٪ سیلیکون طبی خالص است که در پیشگیری و درمان انواع اسکارها بسیار موثر می باشد. این محصول در سایز ۱۵ گرمی در دسترس است.

ویژگی:

- ژل تخصصی درمان انواع اسکارهای جدید و قدیمی
- مناسب انواع پوست
- مناسب جهت استفاده بر روی پوست کودکان
- قابل استفاده برای مادران باردار و شیرده
- مقرون به صرفه

روش مصرف:

اسکارژل باید روزانه ۲ الی ۳ بار یک لایه نازک بر روی پوست تمیز و خشک استفاده شود. در اسکارهای قدیمی ممکن است دوره درمان طولانی تر شود، در نتیجه نظم در مصرف و تکمیل دوره درمان ضروریست.

SCAR SHEET



شیت های سیلیکونی برند دی جی درم پوششی نیمه تراوا هستند که از ۱۰۰٪ سیلیکون طبی خالص تشکیل شده اند و الاستیسیته آنها مشابه پوست است، که در درمان انواع اسکارها کاملاً موثر هستند.

در پروتکل درمان این محصول همسطح سازی و هم رنگ سازی به صورت کامل انجام می شود.

این محصول در ۷ سایز متفاوت طراحی و تولید شده است.

ویژگی:

- تنوع در سایز و اندازه، متناسب با جای زخم
- شفاف، با دوام، قابل شستشو و استفاده مجدد
- بدون ایجاد حساسیت
- مقرون به صرفه و با کارایی طولانی
- استفاده آسان

روش مصرف:

ابتدا پوست، با آب و شوینده ملایم شستشو داده شده و کاملاً خشک شود. سپس روکش محافظ پلاستیکی جدا گردیده و طرف چسبناک آن بر روی اسکار چسبانده شود. نوارهای سیلیکونی یکبار مصرف نیستند و در طول دوره درمان (دو ماه) قابل شستشو و استفاده مجدد می باشند. بهتر است نوار سیلیکونی دی جی درم در طول شبانه روز حداقل ۱۲ و حداکثر ۲۰ ساعت بر روی پوست تمیز و خشک چسبانده شود. در صورت نیاز میتوان این نوارهای سیلیکونی را با چسب کاغذی ضد حساسیت بر روی پوست ثابت نگه داشت.

موارد منع مصرف:

در صورت داشتن سابقه حساسیت به سیلیکون (یا مشتقات سیلیکونی) از نوار و یا ژل سیلیکونی استفاده نشود.
بر روی زخم هایی که هنوز بهبود نیافته اند (زخم های باز و بخیه) استفاده نشود.


شکل نوارهای سیلیکونی	سایز نوارهای سیلیکونی
	5 x 2.5 cm
	7 x 3 cm
	12 x 3.5 cm
	15 x 5 cm
	30 x 5 cm
	12 x 10 cm
	21 x 12 cm
	Breast Circle
	Breast Piece




Before



After

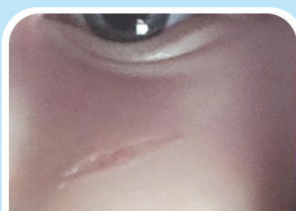

Before

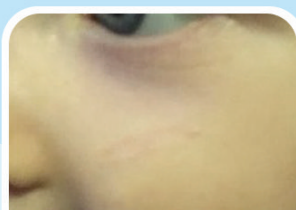

After



Before



After



دفتر مرکزی:
شیراز، بلوار فرهنگ شهر، بعد از کوچه ۲۸، ساختمان دنا، طبقه دوم، واحد ۳
تلفن: ۰۷۱-۹۱۰۰۲۹۳۰
فکس: ۰۷۱-۳۶۳۰۲۷۷۱

دفتر تهران:
خیابان سهروردی شمالی، کوچه شهید سلطانی، پلاک ۱۶، طبقه ۴، واحد ۱۴
تلفن: ۸۸۵۲۰۸۱۹-۰۲۱
فکس: ۸۸۵۲۰۹۶۷-۰۲۱

www.dgdena.com