



دی.جی.دنا

عیب‌یابی نوار قلب (ECG) ثبت شده با چست الکتروکاردیوگرافی (EKG) مشکل را در هر مرحله به ترتیب شماره‌گذاری انجام دهید.

بررسی مشکل را در هر مرحله به ترتیب شماره‌گذاری انجام دهید.

نوع آرتیفکت	امپدانس پوست	حرکت عضلات	اتصال الکتریکی	چست الکترودها	کابل‌ها	تداخل	تجهیزات
پیام خطای قطع بودن لیدها	۴		۱	۳	۵		۲
جابه جایی خط مبنا	۱	۲	۵	۴	۶		۳
نویز AC (خط مبنا ضخیم)	۱	۷	۵	۴	۶	۲	۳
آرتیفکت با الگوی سیگنال متناوب	۲		۱	۳	۵	۴	
آرتیفکت حرکتی	۲	۱	۳	۵	۷	۶	۴
دامنه کم	۳		۱	۵	۶	۴	