

DG Derm

ABSORBENT FOAM
PROTECTIVE BACKING

پانسمان فوم بدون چسب

Non-Adhesive Foam Dressing



مناسب پوست های حساس و شکننده



قابلیت جذب بالا



قابل برش به اندازه مناسب




ترمیم سریع زخم

پانسمان فوم دی جی درم

پانسمان فوم بدون چسب دی جی درم، یک پانسمان از جنس فوم پلی اورتان است که به سرعت ترشحات زخم را جذب کرده و بستر زخم را جهت ترمیم آماده میکند. این پانسمان از یک لایه آب دوست تشکیل شده که توسط یک لایه فیلم پلی اورتان نیمه تراوا پوشانده شده است، این لایه زخم را نسبت به آب و باکتری نفوذ ناپذیر میکند. این پانسمان بسته به شرایط زخم و میزان ترشحات، توانایی ماندگاری تا ۷ روز روی زخم را داراست. لایه تماسی به بستر زخم نمی چسبد و درد بیمار را در هنگام تعویض پانسمان به حداقل میرساند. این پانسمان بعلت ساختار ویژه ای که دارد باعث انتقال فشار به صورت یکسان به بستر زخم شده و مانع از انتقال ضربه به بستر زخم می گردد.

مکانیسم عمل

پانسمان فوم قادر است حجم بالای آگزودا را جذب و در خود نگه دارد. این پانسمان دارای یک پد از جنس فوم پلی اورتان است که آگزودای اضافی زخم را بصورت عمودی جذب می کند و در ساختار سه بعدی خود نگه می دارد. این پد دارای حفرات بیشماری است که آگزودا را در خود محبوس می کنند به نحوی که حتی با وارد شدن فشار به پانسمان نیز آگزودا از آن خارج نشده و به بیرون پس زده نمی شود (نشت آگزودا رخ نمی دهد). سطح خارجی پانسمان نیز پوشیده از یک لایه نیمه تراوا است که اجازه تبخیر و تبادلات گازی را فراهم می کند. با جذب و تبخیر آگزودای اضافی و حفظ شرایط رطوبتی مناسب، ترمیم بافت و سیر مراحل درمان زخم سریعتر انجام می گیرد.

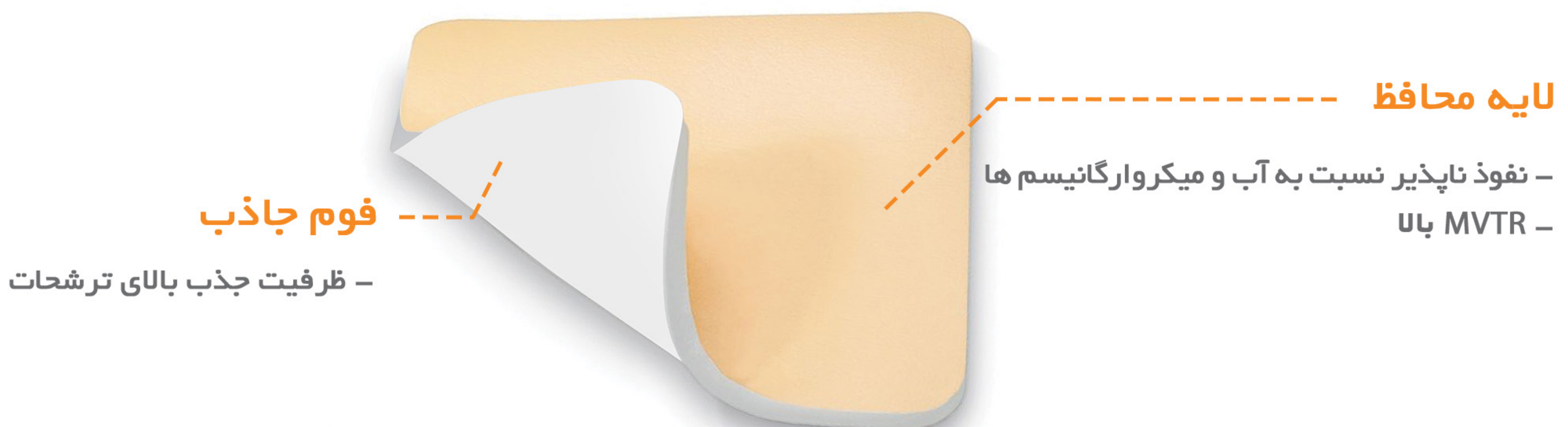

ویژگی محصول

- ✓ مرطوب نگه داشتن محیط زخم
- ✓ کنترل جذب آگزودای زخم
- ✓ ظرفیت جذب بالا
- ✓ نرم و انعطاف پذیر
- ✓ قابل برش به اندازه و شکل مورد نیاز
- ✓ نفوذ ناپذیر نسبت به آب و باکتری
- ✓ عدم چسبندگی به سطح زخم
- ✓ محافظت از زخم از طریق کاهش فشار



استفاده آسان



ظرفیت جذب بالا



نرم و انعطاف پذیر

کاربرد


- ✓ زخم‌های پای دیابتی
- ✓ زخم‌های فشاری
- ✓ زخم‌های جراحی
- ✓ پیوند پوست
- ✓ سوختگی درجه ۱ و ۲
- ✓ زخم‌های عروقی
- ✓ زخم‌های مربوط به لوله‌های تراکئوستومی و گاستروستومی
- ✓ زخم‌های سوختگی ناشی از تشعشع
- ✓ انواع زخم‌های حاد و مزمن
- ✓ زخم‌های دارای ترشحات متوسط تا زیاد



Pressure Ulcers




Leg & Foot Ulcers

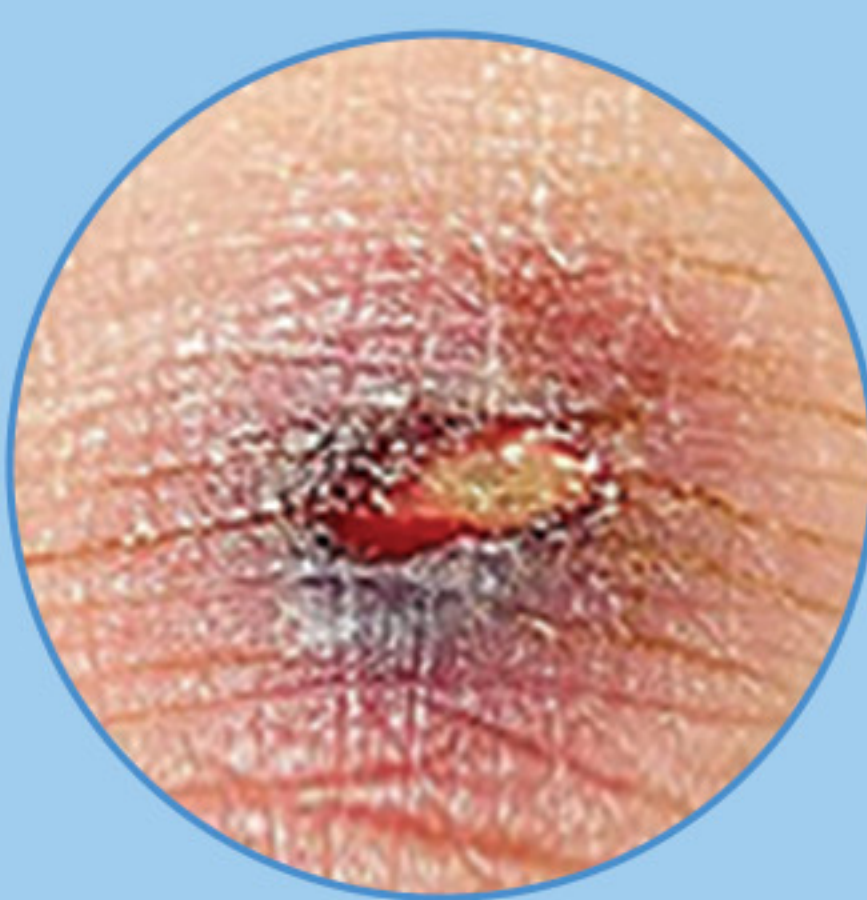

Trauma Wounds



Surgical Wounds

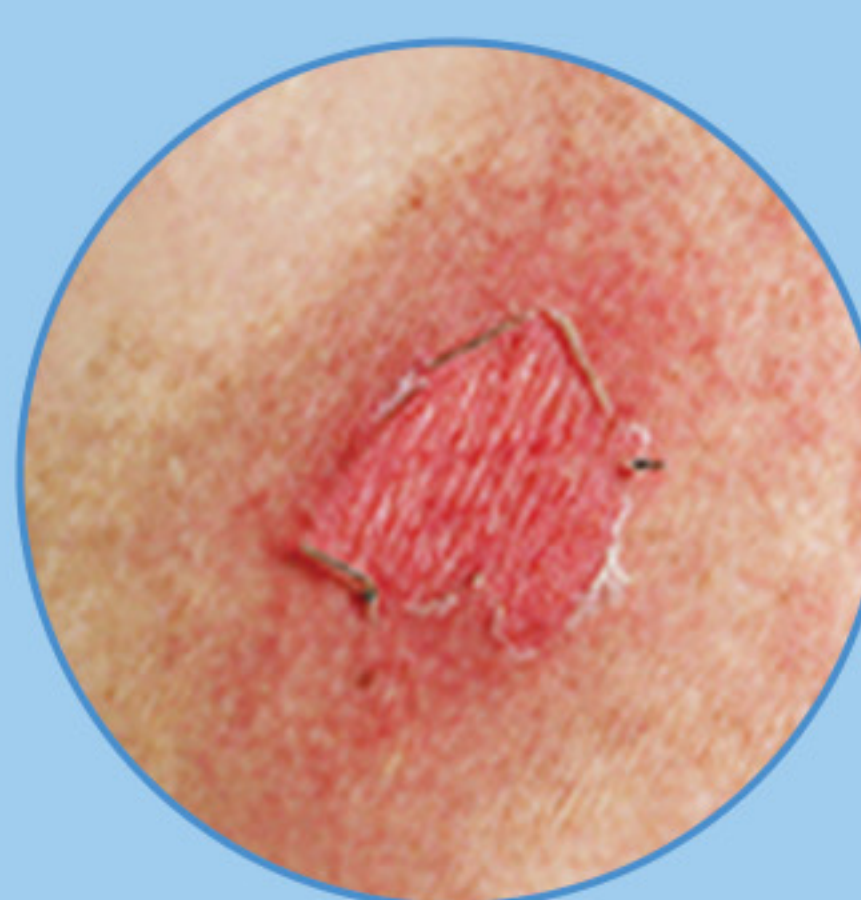

Skin Tears



Secondary Burns

پانسمان فوم تراکستومی

پانسمان فوم تراکستومی دی جی درم یک پانسمان فوم پلی اورتان هیدروفیلیک است که با یک لایه فیلم پلی اورتان پوشانده شده است. این محصول علاوه بر جذب ترشحات، رطوبت زخم را کنترل می‌کند. این پانسمان بدون چسب است که باعث می‌شود برداشتن آن به آسانی امکان پذیر بوده و آسیبی به بافت وارد نشود. از این پانسمان می‌توان به مدت ۷ روز استفاده کرد.




مزایای پانسمان فوم تراکستومی

- ✓ کنترل موثر اگزودای زخم
- ✓ جلوگیری از نفوذ میکروارگانیسم‌ها به زخم
- ✓ راحتی بیمار در هنگام تعویض پانسمان
- ✓ جلوگیری از ایجاد زخم‌های ثانویه

کاربرد

- ✓ اطراف لوله تراکستومی
- ✓ ژژنوستومی
- ✓ اطراف چست تیوپ
- ✓ درن‌ها



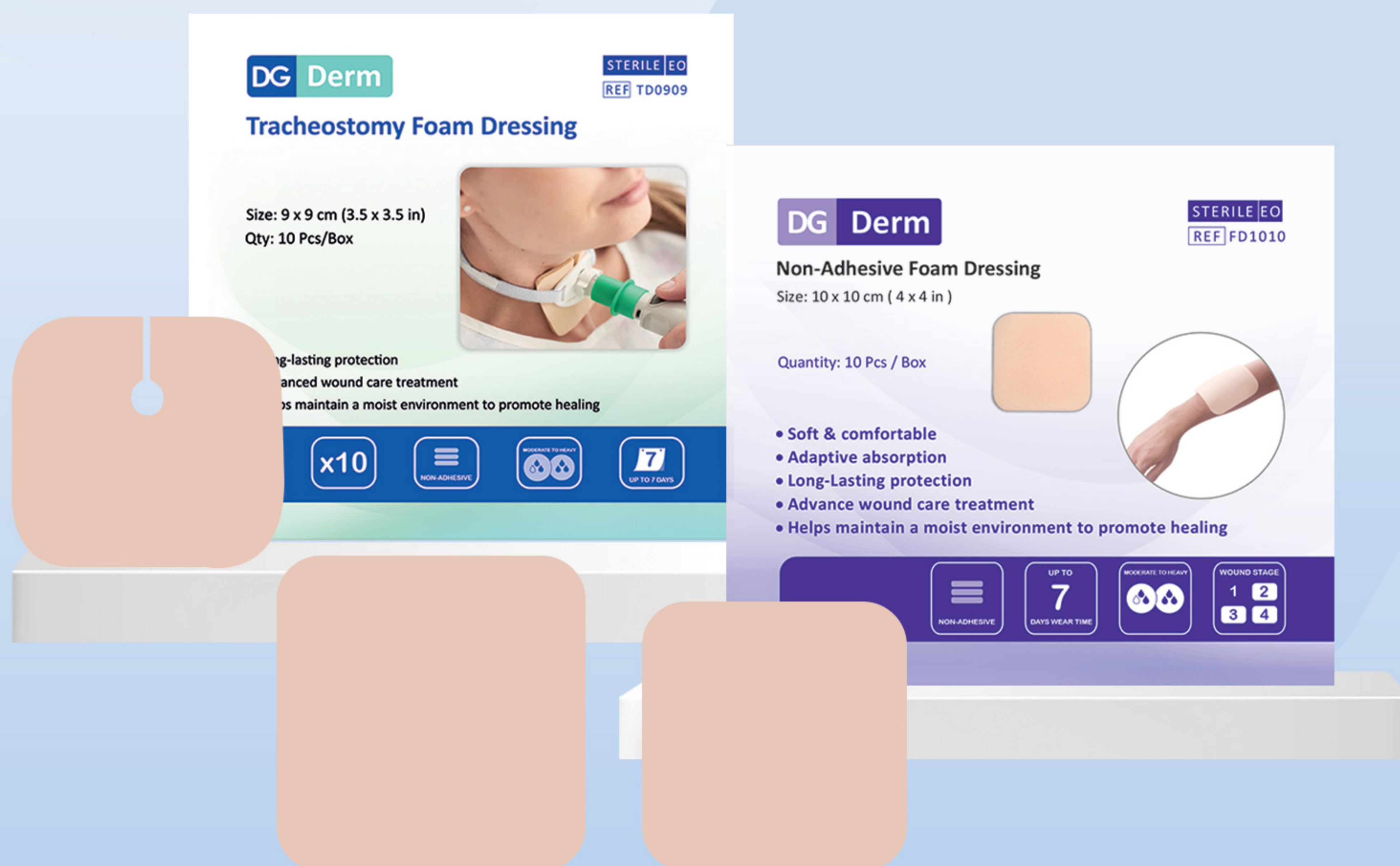

Type	REF	Size (cm)	Per box	Shape
Non-Adhesive Foam Dressing	FD1010	10 X 10	10	
Non-Adhesive Foam Dressing	FD1515	15 X 15	10	
Tracheostomy Foam Dressing	TD0909	9 X 9	10	

دفتر مرکزی : شیراز، بلوار فرهنگ شهر، بعد از کوچه ۲۸ | دفتر تهران : سهروردی شمالی ، کوچه شهید سلطانی | کارخانه : شهرک صنعتی بزرگ شیراز ، بلوار نوآوران
 ساختمان دنا فکس: ۰۷۱-۹۱۰۰۲۹۳۰ | تلفن: ۳۶۳۰۲۷۷۱ | پلاک ۱۶ ، طبقه ۴ ، واحد ۱۴ | تلفن: ۰۲۱-۸۸۵۲۰۸۱۹ | خیابان ۵۰۱ ، پلاک ۳۰-۲۸ | تلفن: ۰۷۱-۳۷۷۳۲۵۴۶